

Modulo SANIFICAZIONE QUOTIDIANA/RICONDIZIONAMENTO DELLE TERMOCULLE - MICROFIBRA										ALLEGATO DELLA CARTELLA INFERMERISTICA													
* Inserire soluzione detergente/disinfettante <input type="text"/>										<input type="checkbox"/> PO G. RODOLICO		<input type="checkbox"/> PO SAN MARCO		ANNO _____		COGNOME E NOME DEL NEONATO _____		U.O. _____					
MESE _____										GIORNO _____		ORARIO _____		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Numero Postazione Open Space																							
Numero Seriale Termoculla																							
R I C O N D Z	Eseguire l'igiene delle mani e degli avambracci, indossare i guanti monouso e DPI																						
	Utilizzare disinfettante LC - GUAN salviette o soluzione detergente disinfettante (Sekusept 1% o altra comparabile) spray su panno pulito										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Passare il panno imbevuto sul materassino e i piani laterali interni di appoggio																						
	Passare il panno pulito imbevuto sulla campana interna																						
	Passare il panno pulito imbevuto sulla campana esterna																						
	Lasciare agire e asciugare/risciacquare il prodotto secondo scheda tecnica																						
I N T E R N A	Eseguire l'igiene delle mani e degli avambracci, indossare i guanti monouso																						
	CPSI elimina eventuali residui sanitari, assiste durante le operazioni di sanificazione e cambio biancheria																						
	Pulire con panno in microfibra pulito inumidito la campana interna																						
	Pulire con panno in microfibra pulito inumidito il materassino e il piano su cui poggia il materassino																						
	Pulire guarnizioni oblò con panno in microfibra pulito inumidito																						
	Asciugare superfici dall'alto verso il basso con panno in microfibra pulito asciutto																						
	Eliminare guanti nei rifiuti speciali e panni usati nell'apposito contenitore																						
	Eseguire igiene delle mani, indossare i guanti monouso e i DPI																						
E S T E R N A	Preparare le soluzioni detergente-disinfettante (Sekusept 1%) o altre comparabili										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Distribuire il detergente-disinfettante su un panno TNT pulito																						
	Detergere le superfici esterne dall'alto verso il basso																						
	Risciacquare le superfici esterne dall'alto verso il basso																						
	Asciugare le superfici esterne dall'alto verso il basso																						
	Eliminare guanti e panni usati nei rifiuti speciali																						
	Eseguire igiene delle mani, indossare i guanti monouso																						
	Manipolare la vasca di umidificazione seguendo le istruzioni del manuale operativo																						
	Eliminare guanti nei rifiuti speciali																						
	Neonato in condizioni critiche che controindicano lo spostamento																						
Firma OSS										FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS		
In caso di trasferimento della termoculla, specificare l' U.O.																							
SERIALE TERMOCULLA _____										SANIFICAZIONE TERMOCULLA PERIODICA/TERMINALE EFFETTUATA IN DATA ____/____/____ ORE ____:____													
SERIALE TERMOCULLA _____										SANIFICAZIONE TERMOCULLA PERIODICA/TERMINALE EFFETTUATA IN DATA ____/____/____ ORE ____:____													
SERIALE TERMOCULLA _____										SANIFICAZIONE TERMOCULLA PERIODICA/TERMINALE EFFETTUATA IN DATA ____/____/____ ORE ____:____													