

Modulo SANIFICAZIONE PERIODICA/TERMINALE DELLE CULLE																																																																																																	
*SANIFICAZIONE PERIODICA (P) *SANIFICAZIONE TERMINALE (T) *CULLA GUSTA (G)																																																																																																	
<input type="checkbox"/> PO G. RODOLICO <input type="checkbox"/> PO SAN MARCO ANNO _____ MESE _____																																																																																																	
UO _____																																																																																																	
* Inserire soluzione detergente disinfettante utilizzata																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="4" style="width:30%;">Numero Seriale Culla</th> <th>GIORNO</th> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th> </tr> <tr> <th>ORARIO</th> <td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td> </tr> <tr> <th>PERIODICA</th> <td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td><td>P</td> </tr> <tr> <th>TERMINALE</th> <td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td><td>T</td> </tr> <tr> <th>CULLA GUASTA</th> <td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td><td>G</td> </tr> </thead> </table>																	Numero Seriale Culla	GIORNO																ORARIO	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	PERIODICA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	TERMINALE	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	CULLA GUASTA	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Numero Seriale Culla	GIORNO																																																																																																
	ORARIO	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:																																																																																	
	PERIODICA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P																																																																																	
	TERMINALE	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T																																																																																	
CULLA GUASTA	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																																																		
Eseguire l'igiene delle mani, indossare i guanti monouso e DPI																																																																																																	
Preparare le soluzioni detergente-disinfettante (Sekusept 1% e 4% o altre comparabili)																																																																																																	
Togliere la biancheria																																																																																																	
Svuotare la culla e smontare nei suoi componenti																																																																																																	
D E T E R S	Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante (Sekusept 1%) in spray sulle superfici																																																																																																
	Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 5 min.)																																																																																																
	Distribuire la soluzione su un panno pulito e strofinare le superfici da pulire dall' interno verso l'esterno e dall' alto verso il basso																																																																																																
	Sciacquare con acqua pulita																																																																																																
	Asciugare con un telo pulito																																																																																																
	Eliminare i guanti e panni nei rifiuti speciali																																																																																																
Eseguire igiene delle mani e indossare i guanti monouso																																																																																																	
D I S I N F	Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante in spray (Sekusept 4% o altra comparabile), iniziando dalle parti interne verso le esterne e dall'alto verso il basso																																																																																																
	Lasciare agire per il tempo di contatto previsto dalla scheda tecnica (Sekusept 15 min.)																																																																																																
	Sciacquare con acqua pulita																																																																																																
	Asciugare con un telo pulito																																																																																																
	Riposizionare tutte le parti smontate																																																																																																
Rimuovere guanti monouso e panni ed eliminarli come rifiuti pericolosi a rischio infettivo																																																																																																	
Firma OSS		FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS	FIRMA OSS																																																																																	
In caso di trasferimento della culla, specificare l' U.O.																																																																																																	